



NOTICE TECHNIQUE

inductophone mobile de comptoir M 900

rayonnement 90 cm

boîtier compact prêt à rayonner - 41.039.26



Composition

Le boîtier **M 900** comprend :

- micro agent directionnel sur bras 30 cm
- circuit rayonnant planar double face
- ampli 6 W classe D fixé sur circuit rayonnant
- alimentation secteur 230 V/15 V
- combiné d'écoute pour malentendants « non T »

Mise en oeuvre

- brancher le combiné : RJ9
- brancher la jack d'alimentation
- brancher l'alimentation sur le secteur
- la led verte s'allume, **M 900** est en veille
- parler face au micro à 30 cm, la led devient rouge
- écouter le rayonnement (**inductomètre** ou malentendant avec prothèse « T »)
- écouter l'agent sur l'écouteur du combiné (circuit indépendant)
- **M 900** est préréglé en atelier
- pour respecter la confidentialité, la portée du rayonnement magnétique est limitée à 90 cm



Remarques

Le combiné d'écoute pour les malentendants « non T » dispose lui-aussi d'un circuit rayonnant et permet l'écoute « T » jusqu'à 2 m de distance du boîtier **M 900** grâce à son câble étiro.



TOPTRONIC

BAUER MERCATIQUE
11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : cb@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>