

boucleTTe

La boucle malentendants portable individuelle



TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE

AFPAPH



Un agent mobile face à malentendant appareillé « T » doit pouvoir être compris immédiatement.

Avec **boucleTTe**, la mini boucle mobile **Toptronic**, il rayonne à une portée de 80 cm et parle mains-libres avec son micro-cravate.

L'interlocuteur malentendant commute sa prothèse et entend l'émission **boucleTTe** ; fort et clair.

boucleTTe répond à des multiples situations de dialogue : infirmière, vente nomade, maître d'hôtel, guide de visite, examinateur médical, animateur événementiel ...



boucleTTe Toptronic est un émetteur de rayonnement magnétique, mini boucle malentendants selon NF 60118-4.


Réalisée en technologie exclusive planar, circuit rayonnant imprimé, **boucleTTe** est doté d'un ampli miniaturisé classe D, faible consommation et alimenté par piles 9 V ou batteries rechargeables.

En utilisation continue, une pile tient 20 heures, une batterie chargée 10 heures. Avec marche/arrêt du bouton, l'autonomie est respectivement de 100 h et 50 h.

boucleTTe Toptronic

Description

- étui souple L 100 x H 160 x P 35 mm avec cordon réglable
- boîtier électronique ABS
 - . circuit rayonnant planar
 - . mini ampli 6 W classe D
 - . 2 piles 9 V ou batteries 9 V rechargeables
 - . interrupteur
- micro-cravate
- option chargeur pour 2 batteries 9 V
- autonomie
 - . fonctionnement continu : piles 20 h - batteries 10 h
 - . fonctionnement alterné : piles 100 h - batteries 50 h

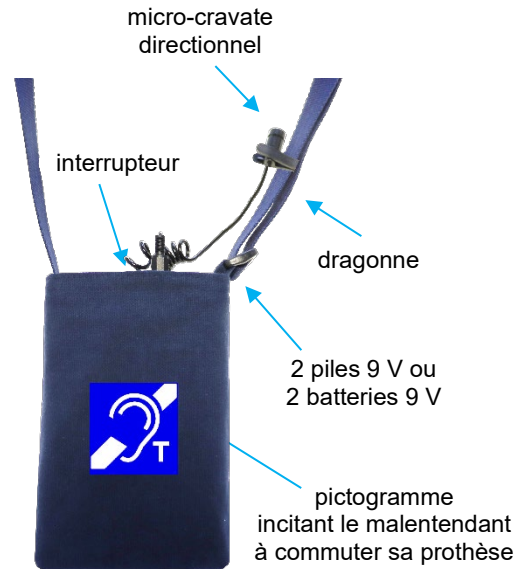

La mise en œuvre de boucleTTe


- avant de partir à la rencontre des malentendants mettre des piles neuves ou des batteries fraîchement chargées. Une charge complète de batteries prenant 29 heures, il est prudent de disposer d'un jeu de batteries supplémentaires
- ranger le boîtier dans son étui
- régler le cordon
- garder **boucleTTe** sur arrêt
- positionner le micro-cravate

En présence du malentendant appareillé « T » :

- allumer **boucleTTe**
- parler de façon intelligible
- éviter le bruit ambiant
- se tenir à moins de 80 cm de l'interlocuteur
- éteindre **boucleTTe** dès la fin de l'entretien, la consommation devient insignifiante



logement pose rapide
2 piles ou batteries 9 V

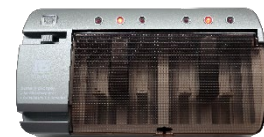

chargeur
2 batteries 9 V



pile 9 V
680 mA



batterie rechargeable 9 V
300 mA

Références boucleTTe

Kit **boucleTTe** avec 2 piles [41.039.41](#) comprend étui, boîtier, micro et 2 piles 9 V

Kit **boucleTTe** avec 2 batteries [41.039.42](#) comprend étui, boîtier, micro et 2 batteries 9 V - nécessite chargeur
Chargeur de 2 batteries 9 V [41.039.43](#)

Boîtier **boucleTTe** [41.039.44](#)

Etui **boucleTTe** [41.039.45](#)

2 piles 9 V [41.039.46](#)

2 batterie rechargeable 9 V [41.039.47](#)

Micro pour **boucleTTe** [41.039.48](#)

TOPTRONIC

11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : contact@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>